

Alle Funktionen auf einen Blick.

EINER WIE
KEINER
der neue
boso
medicus
exclusive

Zusätzlich getrennte Mittelwertanzeige zur differenzierten Blutdruckbeurteilung im Tagesverlauf (vormittags/nachmittags)

Speicher für 90 Messwerte mit Datum und Uhrzeit – Monatsüberblick bei drei Messungen/Tag

Intelligente Aufpumptechnik für Messung ohne Nachpumpen; alternative digitale Druckvorwahl = 180/210/240 mmHg

Erkennt Herzrhythmusstörungen und zeigt diese optisch an

Grafische Fortschrittsanzeige

Optische Anzeige von Bewegungsstörungen während der Messung

Tri-Check Funktion – automatische, dreimalige serielle Messung mit Mittelwertbildung

Anzeige von Datum und Uhrzeit im 12h/24h-Format

Blutdruckbewertungsskala nach WHO für Mittelwerte aus bis zu 90 Messwerten


M-Taste: Abruf von Mittelwerten und Einzelwerten

SET-Taste

Sehr große und kontrastreiche Anzeige für optimale Lesbarkeit

START-Taste

 Statusanzeige für Batterien

 Messung läuft

- Zuschaltbare Sprachausgabe in 5 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Gastmodus für Messungen, die nicht gespeichert werden sollen

Premium-Qualität für die Gesundheit

boso
BOSCH + SOHN
GERMANY

Blutdruck messen mit dem neuen bosco medicus exclusive EINFACH PROGRAMMIEREN



- betätigen
- betätigen für Jahreszahl

1. Einstellung Jahr



- betätigen im Wechsel
- betätigen für Datum | Uhrzeit

2. Einstellung Uhrzeit/Datum



- betätigen
- betätigen für 24h | 12h | OFF

3. Anzeige Uhrzeit 24h



- betätigen
- betätigen für AUTO 180 | 210 | 240

4. Einstellung Aufpumpmodus



- betätigen
- betätigen für ON / OFF

5. Symbol

Einstellung OFF = 1 x messen
Einstellung ON = 3 x aufeinanderfolgend messen



- betätigen
- betätigen für Lautstärke | OFF

6. Sprachausgabe und Lautstärkeregelung




- betätigen
- betätigen für L1 | L2 | L3 | L4 | L5

7. Sprachausgabe L1 = Deutsch

L2 = Englisch | L3 = Französisch | L4 = Italienisch | L5 = Spanisch

Menü verlassen:

 -Taste so oft betätigen bis keine Displayanzeige mehr zu sehen ist



- betätigen

8. Mittelwertanzeige

alle Messungen/VM/NM



- wiederholt betätigen

9. Einzelwertanzeige

Premium-Qualität für die Gesundheit