

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, denn sie hilft Ihnen, hysan® Salinspray richtig anzuwenden.

hysan® Salinspray

hypertone Meersalzlösung

Zur natürlichen Abschwellung der Nasenschleimhaut. Hypertone, sterile Lösung ohne Konservierungsmittel zum Einsprühen in die Nase.

PRODUKTBESCHREIBUNG

hysan® Salinspray ist eine sterile, hypertone Meersalzlösung zur Anwendung in der Nase. Hyperton heißt, dass der Salzgehalt von hysan® Salinspray höher ist, als er normalerweise in den Zellen und Flüssigkeiten des Körpers vorherrscht.

ZUSAMMENSETZUNG

1 ml hysan® Salinspray enthält 27 mg natürliches Meersalz und Wasser für Injektionszwecke. Eine Flasche mit 10 ml Lösung entspricht ca. 140 Sprühstößen. Aus technischen Gründen bleibt immer eine kleine Menge der Lösung in der Flasche.

ZWECKBESTIMMUNG

hysan® Salinspray dient der natürlichen Abschwellung der Nasenschleimhaut.

GEEIGNET FÜR

hysan® Salinspray kann von Erwachsenen und Kindern ab 1 Jahr angewendet werden.

hysan® Salinspray kann aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse auch während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Bei der Verabreichung an ein Kleinkind sowie bei behinderten oder geriatrischen Patienten sollte die Anwendung durch die Eltern oder eine andere Betreuungsperson erfolgen, wie im Abschnitt ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE beschrieben.

NUTZEN, LEISTUNG UND WIRKUNGSWEISE

hysan® Salinspray wirkt zweifach: Zunächst bewirkt es eine Befeuchtung der Nasenschleimhaut, ein Effekt der unmittelbar nach der Anwendung spürbar wird. Außerdem entzieht die hohe Salzkonzentration in hysan® Salinspray in der Folge der Nasenschleimhaut überschüssige Flüssigkeit. Dies ist insbesondere erwünscht bei entzündlichen Schwellungen der Nase, wie sie bei Erkältungsinfekten oder bei Allergien auftreten. Infolge der Abschwellung ist ein freies Durchatmen wieder möglich.

Die Befeuchtung mit hypertoner Meersalzlösung und der Entzug von überschüssiger Gewebsflüssigkeit führen darüber hinaus zu einer Verflüssigung von zähem Sekret. Somit wird der Heilungsprozess bei Nasen- und Nasennebenhöhleninfekten auf natürliche Weise unterstützt.


hysan® Salinspray eignet sich zur natürlichen Abschwellung der Nasenschleimhaut. Insbesondere in Folge eines Schnupfens oder grippalen Infektes kommt es zu einer Anschwellung der Schleimhäute von Nase und Nasennebenhöhlen, so dass ein freies Durchatmen und der Abtransport zäh sitzenden Sekrets kaum mehr möglich sind. hysan® Salinspray unterstützt die Nasenschleimhaut in ihrer natürlichen Funktion, indem es zu einer Abschwellung der entzündeten Schleimhaut sowie einer Verflüssigung des zähem Sekrets beiträgt. Die Anwendung von hysan® Salinspray kann dazu beitragen, die Verwendung von anderen abschwellenden Nasensprays (sogenannte Alpha-Sympathomimetika) zu reduzieren. hysan® Salinspray ist eine reine Meersalzlösung. Die heilsamen Effekte von Salz, insbesondere bei Atemwegsinfekten, sind seit Jahrhunderten beschrieben. Hohe Salzkonzentrationen in der Atemluft, wie sie in unmittelbarer Meeresnähe oder in Salinen herrschen, werden bis heute erfolgreich therapeutisch genutzt.

hysan® Salinspray nutzt diese bekannten Eigenschaften, indem es lokal – am Ort der entzündlichen Vorgänge in der Nase – eine hohe Salzkonzentration erzeugt. Abschwellung und Reinigung der Nase führen schnell zu einer Besserung der Beschwerden.

hysan® Salinspray enthält kein Konservierungsmittel und kein Treibgas.

ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Verwenden Sie hysan® Salinspray nur, wenn die Versiegelung der Faltschachtel vor der ersten Anwendung unversehrt war (☞).

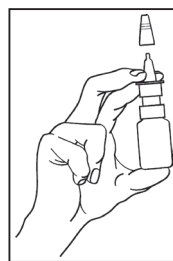

Vor Gebrauch die Kappe abnehmen.

Pumpe bis zum Austritt der Lösung betätigen (in der Regel 1–2mal). Danach ist das System für jede weitere Anwendung gebrauchsfertig.

Die Sprühöffnung in das Nasenloch einführen und einmal pumpen, dabei leicht einatmen. Je nach Bedarf mehrmals täglich 1–2 Sprühstöße in jedes Nasenloch einsprühen.

Wichtig aus hygienischen Gründen:

Aus hygienischen Gründen bitte den Nasenadapter nach jeder Anwendung abwischen und mit der Schutzkappe verschließen.

Zur Vermeidung von Infektionsübertragungen sollte jede Flasche hysan® Salinspray nur von derselben Person benutzt werden (☞).

Wenden Sie sich bitte an den Hersteller, wenn Sie Fragen zur korrekten Anwendung dieses Medizinproduktes haben.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Wenn Sie sich nicht besser fühlen oder wenn Sie sich nach mehrtägiger Anwendung schlechter fühlen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.



Es sind keine Wechselwirkungen mit der Anwendung von hysan® Salinspray bekannt. Wenn Sie andere Nasensprays oder Nasentropfen anwenden, sollte zwischen den Anwendungen ein Abstand von mindestens 30 Minuten liegen. hysan® Salinspray sollte immer zuletzt angewendet werden. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob und wie Sie mehrere Nasenpräparate kombinieren sollen. Es sind keine Risiken im Zusammenhang mit einer Überdosierung von hysan® Salinspray bekannt.

NEBENWIRKUNGEN

Da hysan® Salinspray keine Konservierungsmittel enthält, ist das Produkt auch bei lang dauernder Anwendung im Allgemeinen sehr gut verträglich. Sie können es deshalb bedenkenlos auch über einen längeren Zeitraum benutzen. Wenn während der Anwendung von hysan® Salinspray unerwünschte Nebenwirkungen auftreten, sollte die Anwendung des Nasensprays abgebrochen werden. Falls während der Verwendung dieses Medizinprodukts oder als Folge seiner Verwendung ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller () und Ihrer nationalen Behörde.

DOSIERUNG

hysan® Salinspray sollte entsprechend Ihrem Zustand und den Anweisungen Ihres Arztes oder Ihres Apothekers angewendet werden. Üblicherweise werden dreimal täglich je 1 bis 2 Sprühstöße hysan® Salinspray in jedes Nasenloch verabreicht. Wenn erforderlich kann es aber auch öfter angewendet werden. Es bestehen keine Beschränkungen in der Anwendungsdauer. hysan® Salinspray ist für eine Daueranwendung geeignet. Allerdings sollten Sie – wie bei allen Erkrankungen – bei länger anhaltenden Beschwerden einen Arzt um Rat fragen.

GEGENANZEIGEN

hysan® Salinspray sollte nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich gegen einen der Inhaltsstoffe sind.

LAGERUNG

Nicht über 25 °C lagern ( 25 °C). Verwenden Sie hysan® Salinspray nicht mehr nach Ablauf des Verfalldatums (). hysan® Salinspray kann nach dem ersten Anbruch 6 Monate verwendet werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Entsorgen Sie dieses Medizinprodukt über den Hausmüll entsprechend Ihrer nationalen Gesetzgebung. Diese Maßnahme trägt zum Schutz der Umwelt bei.

VERFÜGBARE PACKUNGSGRÖSSEN

10 ml Nasenspray (unverk. Muster)
20 ml Nasenspray

STAND DER INFORMATION:

November 2024

 **URSAPHARM Arzneimittel GmbH,**
Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken
Deutschland

Deutschland:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH,
Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken,
Tel.: +49 6805/9292-0, Fax: +49 6805/9292-88,
E-Mail: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

Österreich:

URSAPHARM Ges.m.b.H.,
Inkustraße 1-7, 3400 Klosterneuburg,
Tel.: +43 2243/26006, Fax: +43 125 330 339 113
E-Mail: office@ursapharm.at

 0197

 MD

 STERILE A

Symbol:	Erklärung:
	Hersteller
	Vertrieb
	Medizinprodukt
	CE-Kennzeichnung
	Eindeutige Produktkennung
	Sterilisiert mit aseptischen Verfahren
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden und Gebrauchsanweisung beachten
	Chargennummer
	Herstellungsdatum [JJJJ-MM]
	Haltbarkeitsdatum [JJJJ-MM]
	Gebrauchsanweisung befolgen
 25 °C	Nicht über 25 °C lagern.
	Einzelner Patient – mehrfach verwendbar

Wir wünschen Ihnen gute Besserung!

Ihre Meinung zu unserem Produkt ist uns wichtig!
Wir freuen uns, per Post, Fax (Nr. +49 6805/92 92 222)
oder via <https://ursapharm.de/produktfeedback/>
von Ihnen zu hören.

