

Gebrauchsanweisung!  
Bitte aufmerksam lesen!




Ohne Zink,  
ohne Konservierungs-  
stoffe

## Sicherheit für die Dritten. Protefix®

### Protefix® Haft-Creme

Extra-Stark

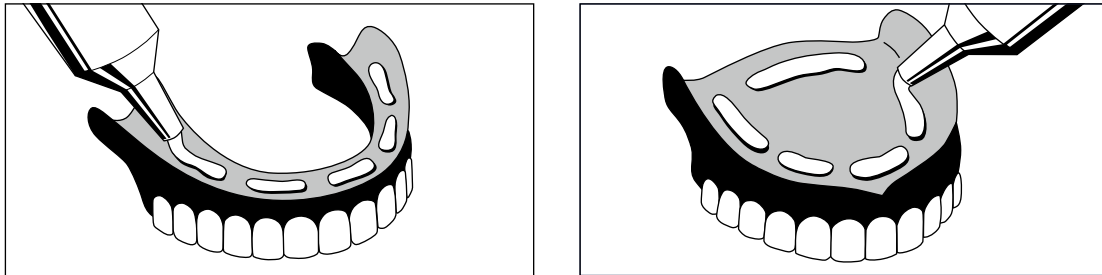

**Bewährte Rezeptur: ohne Zinksalz, ohne Konservierungsstoffe.**  
Auch für Teilprothesen geeignet.

#### **Anwendung:**

Haft-Creme zum Auftragen auf Zahnprothesen.

#### **Dosierung und Art der Anwendung:**

Tagesdosis: Bis zu 0,8 g Haft-Creme.

Prothese und Mundschleimhaut von Rückständen reinigen und **Protefix® Haft-Creme Extra-Stark** in Abständen dünn auf die nasse Prothese auftragen (in die Vertiefung der Ober- oder Unterkieferprothese, die dem Kiefer später aufliegt). Bei Bedarf können Sie auch den hinteren Teil der Gaumenplatte an der Oberkieferprothese mit einem Streifen **Protefix® Haft-Creme Extra-Stark** versehen. Setzen Sie die Zahnprothese dann ein und drücken Sie sie einige Sekunden lang fest an den Kiefer. Warten Sie ca. 5 Minuten, bevor Sie Nahrung zu sich nehmen. Dosieren Sie die **Protefix® Haft-Creme Extra-Stark** sparsam, da bei einer Überdosierung die Haftung Ihrer Prothese beeinträchtigt werden kann.

#### **Gegenanzeigen:**

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Nicht bei verletzter oder erkrankter Mundschleimhaut anwenden.

#### **Nebenwirkungen:**

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder auch des Gesamtorganismus nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt auf. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden Nebenwirkungen sind dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde zu melden.



#### **Achtung! Bitte beachten Sie folgende Hinweise:**

- Die Anwendung der Haft-Creme sollte nur zeitweilig erfolgen. Lassen Sie den Sitz Ihrer Prothese regelmäßig überprüfen.
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
- Um ein Ausölen der Haft-Creme zu verhindern, Tube vor dem Gebrauch gut durchkneten.
- **Neuer Deckel mit verbessertem Schließmechanismus.**
- Nach Gebrauch die Tube sorgfältig verschließen, die Öffnung dabei sauber und trocken halten, da das Eindringen von Flüssigkeit zur Verhärtung der Haft-Creme führen kann.
- Haftmittlrückstände lassen sich leicht mit einem speiseölgetränkten Wattebausch entfernen.

#### **Zusammensetzung:**

**Protefix® Haft-Creme Extra-Stark** enthält:

Cellulose Gum (27 %), Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer (26 %), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Silica, Menthol, CI 14720.

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet im 10/2020.

**1. Nass-Haftkraft:** direkt auf die feuchte Prothese auftragbar

**2. Starker Halt:** Extra-Stark mit Langzeit-Wirkung

**3. Schutz:** eine wirkungsvolle Randabdichtung hilft, das Eindringen von Speiseresten unter die Prothese zu verhindern

**4. Tragekomfort:** dank elastischer Polsterung zwischen Zahnfleisch und Prothese

**Protefix® Haft-Creme Extra-Stark** ideal bei schwierigeren Haftproblemen. Sie wirkt dank ihrer Nass-Haftkraft sofort und lang anhaltend, selbst bei schwierigen Haft-Problemen.

CE



  
**Queisser**  
PHARMA  
Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg  
DEUTSCHLAND  
www.protefix.de