

**Gebrauchsanweisung!**  
**Bitte aufmerksam lesen!**

# Protefix® Wund- und Schutzgel

Protefix® Wund- und Schutzgel zum Auftragen auf die entzündete Mundschleimhaut.


## Anwendung

Mund ausspülen, gegebenenfalls von Prothesen-Haftmittelresten reinigen.

Ca. 3 – 4 x täglich eine erbsengroße Menge **Protefix®** Wund- und Schutzgel auf ein Wattestäbchen oder die saubere Fingerkuppe geben und auf die betroffenen Stellen auftragen, dabei leicht einmassieren.

Achten Sie bitte darauf, dass der entstehende Schutzfilm möglichst gleichmäßig verteilt wird und so nachhaltig wirken kann.

Warten Sie ca. 15 Minuten, bevor Sie Nahrung zu sich nehmen. Den Mund unmittelbar nach der Anwendung nicht ausspülen.

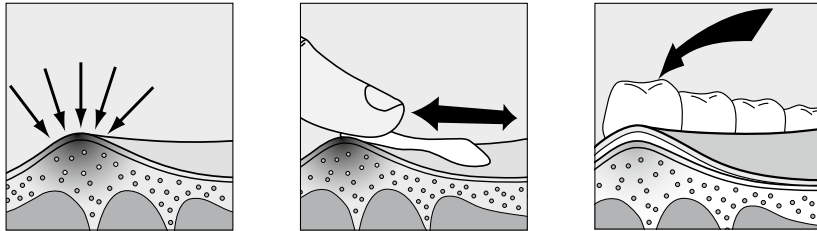

## Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

## Nebenwirkungen

Protefix® Wund- und Schutzgel soll für das angegebene Anwendungsgebiet verwendet werden, kann aber einen ärztlichen Rat nicht ersetzen. Sollten die Symptome länger als fünf Tage anhalten oder Verschlimmerung eintreten (besonders bei Blutungen oder Infektionen), empfiehlt es sich, ärztlichen oder zahnärztlichen Rat einzuholen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion sollte vorsichtshalber die Behandlung unterbrochen und ein Arzt aufgesucht werden. Bei großflächiger Anwendung kann an den behandelten Stellen die Wirkung von Haftmitteln beeinflusst werden. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden Nebenwirkungen sind dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde zu melden.

Protefix® Wund- und Schutzgel ist ein Medizinprodukt zur Anwendung bei Druckstellen, Entzündungen der Mundschleimhaut und Aphthen, insbesondere unter Prothesen, Teilprothesen und Zahnsparanten.

Es enthält Glycerol-Oxytriestere („TGO“), das durch ein besonderes Verfahren aus speziellen Pflanzenölen gewonnen wird, und besitzt ein patentiertes Wirkprinzip:

Protefix® Wund- und Schutzgel

- bildet einen Schutzfilm, der die Wunde vor äußeren Reizen schützt
- lindert den Schmerz
- keine negative Beeinflussung der Mundflora

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet im 08/2019.



Achtung! Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Protefix® Wund- und Schutzgel nur gemäß der oben aufgeführten Anwendungsbeschreibung verwenden.
- Nach Gebrauch die Tube sorgfältig verschließen, die Öffnung dabei sauber und trocken halten, um Verunreinigungen auszuschließen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

## Zusammensetzung:

Protefix® Wund- und Schutzgel enthält: Hydroxyperoxygenated Corn Oil (92,7 %), Silica, Eugenia Caryophyllus, Sodium Saccharin, Mentha Piperita.



  
**Queisser**  
PHARMA  
Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg  
DEUTSCHLAND  
www.protefix.de