



Abilar[®] 10%

WUNDSALBE



Abilar® 10%

Wundsalbe

Wenn ein Baum verwundet wird, erzeugt er Resin (Rohharz), um sich zu schützen und zu heilen. Dieses Wissen ist schon seit Jahrhunderten Bestandteil der Volksmedizin der Lappen im nördlichen Europa. Harzhältige Salben werden auch heute häufig zur Heilung und Desinfektion von Hautverletzungen und offenen Wunden eingesetzt.

ABILAR® WIRKSPEKTRUM



ANTIMIKROBIELL
gegen Bakterien und Pilze.



ENTZÜNDUNGSCHEMMEND
ähnlich wirkend wie mittelstarke Kortikosteroide in der Hemmung von Entzündungen und deren Symptomen.



SCHNELLERE WUNDHEILUNG
bestimmte Harzkomponenten (Terpenoide, Lignane und Zimtsäure) fördern die Zell- und Hautregeneration.

ABILAR® ANWENDUNGSGEBIET

- + Schnitt- und Schürfwunden
- + Hautschrunden
- + Operationswunden
- + Chronische Wunden, Ulcera
- + Verbrennungen und Verbrühungen

Für Kinder ab dem 3. Lebensjahr empfohlen.

*Abilar® ist auch für die Wundbehandlung in der Veterinärmedizin bestens geeignet.



ANWENDUNG

Die betroffene Hautstelle sollte vor der Anwendung von Abilar® gewaschen werden und sauber sein. Die Salbe wird einmal täglich direkt auf die Wunde aufgetragen. Abilar® kann unter einem klassischen Wundverband verwendet werden, allerdings sollte dieser dann zumindest jeden zweiten Tag gewechselt werden.*

RESOL® TECHNOLOGIE

Das von den Nadelbäumen ausgeschiedene Rohharz ist eine komplizierte Mischung aus hunderten chemischen Bestandteilen. Modernste Herstellungsprozesse ermöglichen stabile und sichere Produkte mit natürlicher Wirksamkeit. Die Resol® Technologie ist ein von Repolar Pharmaceuticals entwickeltes und patentiertes Verfahren, mit welchem Harz von der Tanne (*Picea abies*) gesammelt und ohne Erhitzung (keine Verbrennungsrückstände!) schonend in eine homogene flüssige Form gebracht wird. Das Rohmaterial wird in Nordfinland ohne Verletzung der Bäume gesammelt.

ABILAR® IST SICHER

Abilar® verursacht keine Resistenzen und enthält keine metallischen Bestandteile. **Hormon-, kortison- und antibiotikafrei.**

Bis auf allergische Hautreaktionen (Kontaktdermatitis) bei Personen, die überempfindlich auf Harz reagieren, sind **keine Gegenanzeigen bekannt.** Eine Harzüberempfindlichkeit tritt bei ca. 1-3 % der Bevölkerung auf.

Abilar® 10 % Wundsalbe



20 g Tube € 19,90, PZN 3987277
Medizinprodukt der Klasse IIb



ANTIMIKROBIELL
ENTZÜNDUNGSHEMMEND
SCHNELLERE WUNDHEILUNG

**FÜR VERLETZUNGEN IM ALLTAG UND
DIE PROFESSIONELLE WUNDPFLEGE.**

Über Wirkung und mögliche unerwünschte
Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

REPOLAR
PHARMACEUTICALS

Hersteller:

Repolar Pharmaceuticals Oy
Suomalaistentie 7
FIN-02270 Espoo
www.repolar.com

 **PELPHARMA**
Ein österreichisches Pharmaunternehmen

Vertrieb in Österreich:

Pelpharma Handels GmbH
Wohndorfweg 36
A-3001 Tulbingerkogel
www.pelpharma.at