

Nettofüllmenge: 30 g e

Zutaten:  
PMA-Zeolith®

**Anwendung:**

Das PANACEO CARE ZEOLITH-WUNDPUDER dünn und gleichmäßig auf die betroffene Stelle auftragen. Nicht in offene, tiefe oder infizierte Wunden einbringen. Bei Bedarf mit einem Verband abdecken. Anwendung ein- bis mehrmals täglich oder nach Anweisung eines medizinischen Fachpersonals wiederholen und bis zur vollständigen Abheilung der Wunde fortsetzen.

**Geeignet für alle Altersgruppen!**

# CARE ZEOLITH WUND PUDER

100 % reine Natur



**Zur Aufsaugung von Exsudaten und Bildung einer Schutzschicht bei oberflächlichen Hautverletzungen.**

**Natur-Medizinprodukt**

Das PANACEO CARE ZEOLITH-WUNDPUDER nimmt Exsudate auf und bildet eine gleichmäßige, flexible Schutzschicht auf intakter Haut sowie oberflächlichen Wunden. In der Regel wird die Bildung einer brüchigen Kruste verhindert, wodurch die Wunde optimal vor mechanischen Einflüssen geschützt wird. So entsteht ein stabiles Wundmilieu, das die natürliche Heilung unterstützt. (Weitere Informationen und Sicherheitshinweise siehe Innenseite.)



E-038



Hergestellt in Österreich

**PANACEO**



Hier öffnen ►

### **Sicherheitshinweise:**

- Kein Ersatz für eine ärztliche Behandlung.
- Nicht zur Anwendung bei tiefen oder klaffenden Wunden.
- Nicht inhalieren.
- Nicht in der Nase und den Ohren anwenden.
- Kontakt mit den Augen vermeiden.
- Im Fall schwerwiegender Vorkommnisse bitte Hersteller und Ihre Behörde kontaktieren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 6 Jahren aufbewahren.
- Dose nach Gebrauch stets verschließen.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll.



**PANACEO** International GmbH,  
Finkensteiner Straße 5,  
A-9585 Villach-Gödersdorf