

Versand

Der Versand soll am **Montag oder Dienstag** erfolgen, sodass die Probe vor dem Wochenende im Labor eintrifft. Bei Versand per Post, am **Postschalter** abgeben. Vorsicht, nicht in einen Briefkasten werfen.

Ergebnis

Sie erhalten Ihr Ergebnis per E-Mail.

Inhalt:

- 1 Parasiten bei Hund oder Katze
Testkit Anleitung
- 1 Probenröhrchen mit Entnahmелöffel
und Barcode
- 1 Schutzbeutel
- 1 Zellstoff
- 1 Verpackungskarton
- 1 Rückversandumschlag

Parasiten bei Hund oder Katze Testkit Anleitung



Gesundheit beginnt bei uns.

Bitte lesen Sie die Anleitung
vor Probenentnahme
vollständig durch.

Wichtig!

1. Barcode des
Proberöhrchens vor
Versand registrieren.
2. Probe nur am Montag
oder Dienstag entnehmen
und am selben Tag
versenden.
3. Probe bis zum Versand
gekühlt lagern.

Gesundheit beginnt bei uns.

www.procomcurediagnostics.com



Anleitung Kotentnahme

1. Benutzen Sie den Entnahmелöffel aus dem Probenröhrchen, um eine haselnussgroße Menge Kot zu entnehmen. Das Probenröhrchen darf nicht überfüllt werden.
2. Achten Sie darauf, dass Sie mit der entnommenen Probe nicht die Außenseite des Probenröhrchens berühren.
3. Das Probenröhrchen fest mit dem Deckel verschließen.
4. Das fest verschlossene Probenröhrchen mit dem Zellstoff in den Schutzbeutel geben.
5. Geben Sie den Schutzbeutel in den Verpackungskarton und den Verpackungskarton in den Rückversandumschlag.
6. Die Probe am Tag der Entnahme verschicken und bis dahin gekühlt lagern.



Registrierung

1. Registrieren Sie den Barcode des Probenröhrchens unter dem Link: **nngs.procomcure.com/vet/?qrppet** oder scannen Sie den QR Code:



2. Füllen Sie die Daten vollständig und richtig aus. Achten Sie besonders darauf, eine **gültige** E-Mail-Adresse zu verwenden. Das Ergebnis erhalten Sie per E-Mail.
3. Bitte beachten Sie, dass ohne korrekte Registrierung kein Ergebnis übermittelt werden kann.

Disclaimer:

Die Analyse basiert auf der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) der Parasiten. Das Vorhandensein dieser Parasiten kann mittels der PCR Methode und der Sequenzierung nachgewiesen werden. Es können auch andere Parasiten im Darm sein, die durch die PCR nicht erfasst wurden. Die derzeitige Interpretation der ausgewählten Parasiten kann sich in Zukunft aufgrund der Veröffentlichung neuer wissenschaftlicher Studien ändern. Dieser Bericht wird Ihnen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken zur Verfügung gestellt und ersetzt weder den Besuch bei einem Tierarzt noch den Rat oder die Leistungen eines Tierarztes.