

Gebrauchsanweisung!
Bitte aufmerksam lesen!




Ohne Zink,
ohne Konservierungs-
stoffe

Sicherheit für die Dritten. Protefix®

Protefix® Haft-Creme NEUTRAL

ohne Farb- und Geschmacksstoffe

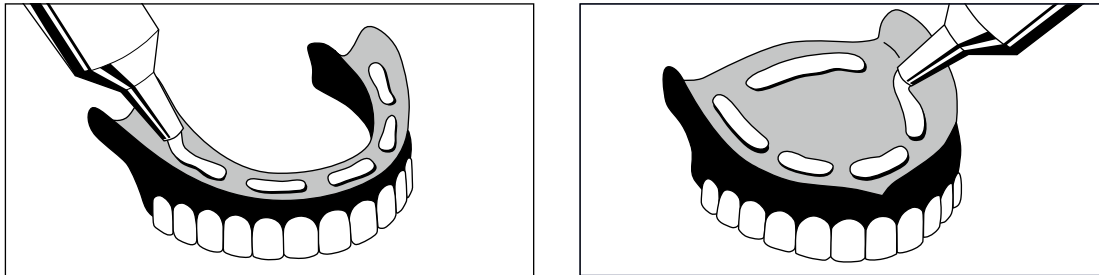

Bewährte Rezeptur: ohne Zinksalz, ohne Konservierungsstoffe.
Auch für Teilprothesen geeignet.

Anwendung:

Haft-Creme zum Auftragen auf Zahnprothesen.

Dosierung und Art der Anwendung:

Tagesdosis: Bis zu 0,8 g Haft-Creme.

Prothese und Mundschleimhaut von Rückständen reinigen und Protefix® Haft-Creme NEUTRAL in Abständen dünn auf die nasse Prothese auftragen (in die Vertiefung der Ober- oder Unterkieferprothese, die dem Kiefer später aufliegt). Bei Bedarf können Sie auch den hinteren Teil der Gaumenplatte an der Oberkieferprothese mit einem Streifen Protefix® Haft-Creme NEUTRAL versehen. Setzen Sie die Zahnprothese dann ein und drücken Sie sie einige Sekunden lang fest an den Kiefer. Warten Sie ca. 5 Minuten, bevor Sie Nahrung zu sich nehmen. Dosieren Sie die Protefix® Haft-Creme NEUTRAL sparsam, da bei einer Überdosierung die Haftung Ihrer Prothese beeinträchtigt werden kann.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Nicht bei verletzter oder erkrankter Mundschleimhaut anwenden.

Nebenwirkungen:

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder auch des Gesamtorganismus nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt auf. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden Nebenwirkungen sind dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde zu melden.



Achtung! Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Die Anwendung der Haft-Creme sollte nur zeitweilig erfolgen. Lassen Sie den Sitz Ihrer Prothese regelmäßig überprüfen.
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
- Um ein Ausölen der Haft-Creme zu verhindern, Tube vor dem Gebrauch gut durchkneten.
- Neuer Deckel mit verbessertem Schließmechanismus.
- Nach Gebrauch die Tube sorgfältig verschließen, die Öffnung dabei sauber und trocken halten, da das Eindringen von Flüssigkeit zur Verhärtung der Haft-Creme führen kann.
- Haftmittlrückstände lassen sich leicht mit einem speiseölgetränkten Wattebausch entfernen.

Zusammensetzung:

Protefix® Haft-Creme NEUTRAL enthält:

Cellulose Gum (27 %), Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer (26 %), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Silica.

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet im 01/2021.

1. **Neutral:** ohne Farb- und Geschmacksstoffe, daher für Allergiker geeignet, homöopathieverträglich, keine Aromaveränderung von Speisen und Getränken

2. **Nass-Haftkraft:** direkt auf die feuchte Prothese auftragbar

3. **Starker Halt:** Extra-Stark mit Langzeit-Wirkung

4. **Schutz:** hilft das Eindringen von Speiseresten unter die Prothese zu verhindern, Polsterungseffekt erhöht den Tragekomfort.

Protefix® Haft-Creme NEUTRAL sorgt für ein natürliches, sicheres Tragegefühl der Dritten, selbst bei schwierigen Haft-Problemen.

CE




Queisser
PHARMA
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
DEUTSCHLAND
www.protefix.de