


**Gebrauchsanweisung!**  
**Bitte aufmerksam lesen!**



Ohne Zink,  
ohne Konservierungs-  
stoffe

## Sicherheit für die Dritten. Protefix®

### Protefix® Haft-Pulver Extra Stark

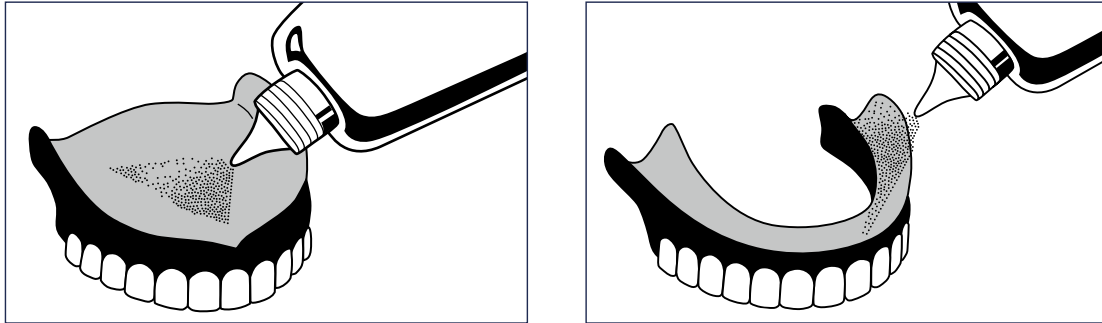

#### **Anwendungsgebiet:**

Pulver als Haftmittel für Zahnprothesen.

#### **Dosierung und Art der Anwendung:**

Protefix® Pulver gleichmäßig dünn auf die angefeuchtete Prothese streuen. Die Gebissplatte sitzt nach dem Einsetzen sofort fest und haftet viele Stunden sicher im Mund. Sollte vorzeitig Lockerung eintreten – etwa durch Genuss von viel Flüssigkeit – so genügt es, Protefix® Haft-Pulver dünn nachzustreuen. Die Prothese sitzt sofort wieder fest. Etwaige Rückstände lassen sich leicht mit Hilfe einer Zahnbürste unter fließendem Wasser von der Prothese abspülen. Besonders hartnäckige Haftmittlrückstände können mit einem speiseölgetränkten Wattebausch entfernt werden. Zur Vermeidung einer zu großen Ausstoßmenge bitte die Flasche nicht zusammendrücken. Flasche schräg halten und leicht mit dem Zeigefinger antippen. Ein genaues Dosieren ist so möglich. Durch das Auftragen von zu viel Haftpulver kann sich dieses verhärten, wodurch das Risiko einer Mundschleimhautschädigung erhöht wird.

#### **Zusammensetzung:**

Natriumalginat (100 %).

#### **Gegenanzeigen:**

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Nicht bei verletzter oder erkrankter Mundschleimhaut anwenden.

#### **Nebenwirkungen:**

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder des Gesamtorganismus beobachtet worden.

Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Zahnarzt auf. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden Nebenwirkungen sind dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde zu melden.

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet im 06/2019.



**Achtung! Bitte beachten Sie folgende Hinweise:**

Die Anwendung von Protefix® Haft-Pulver sollte nur zeitweilig erfolgen. Eine anhaltend schlechte Haftung der Prothese ohne Haftpulver kann auf Abweichungen in ihrer Passgenauigkeit und Funktion zurückzuführen sein. In diesem Fall sollte der Arzt aufgesucht werden.

Nur auf die gesunde Mundschleimhaut auftragen. Bitte klären Sie dies mit Ihrem Zahnarzt ab.

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

CE



  
**Queisser**  
PHARMA  
Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg  
DEUTSCHLAND  
www.protefix.de