

# HAFTCREME

100% Lebensmittelinhaltsstoffe  
... ganz natürlich!

# DENTURE ADHESIVE

100% food ingredients  
... all natural!



**NaturDent**



[www.naturdent.eu](http://www.naturdent.eu)  
[office@naturdent.eu](mailto:office@naturdent.eu)

[www.facebook.com/fittydentheadoffice](https://www.facebook.com/fittydentheadoffice)

AUSTRIA

**NaturDent**



[www.naturdent.eu](http://www.naturdent.eu)  
[office@naturdent.eu](mailto:office@naturdent.eu)

[www.facebook.com/fittydentheadoffice](https://www.facebook.com/fittydentheadoffice)

AUSTRIA

# NaturDent®

## DE HAFTCREME



### ANWENDUNG

1. Zahnprothese reinigen und vollständig trocknen.
2. *NaturDent* Haftcreme in dünnen Streifen nicht zu nah am Rand auf die Prothese auftragen. Sparsam dosieren, sodass keine Haftcreme seitlich austritt.
3. Prothese einsetzen - Zähne kurz und kräftig zusammenbeißen. Möglichst 15 Minuten nicht essen oder trinken.
4. Tube nach Gebrauch sorgfältig verschließen.

## EN DENTURE ADHESIVE



### APPLICATION

1. Clean and dry your dentures thoroughly.
2. Apply *NaturDent* on the dentures in strips making sure it is not too close to the edge of the dentures.
3. Insert dentures into mouth and bite firmly. For best results, wait 15 minutes before eating or drinking.
4. Close tube tightly immediately after use.

FOLDERN1118

\*Muster ist nicht zum Verkauf bestimmt

Inhaltsstoffe/ingredients: Sodium Carboxymethylcellulose, Solution of Polyvinylacetate, Ester of Rosin, Cocos Nucifera Oil, Silica

# NaturDent®

## DE REINIGUNGSTABLETTEN



### ANWENDUNG

1. Prothese unter fließendem Wasser mit einer Bürste reinigen.
2. Eine Reinigungstablette mit der Prothese in der Reinigungsdose mit warmen - nicht kochend - Wasser bedecken.
3. Der Reinigungsprozess ist nach 10 Minuten abgeschlossen.
4. Prothese gründlich abspülen und trocknen.

## EN CLEANSING TABLETS



### APPLICATION

1. Brush denture under running water with a toothbrush.
2. Drop one tablet and the dentures in the Cleansing Box and cover with warm - not boiling - water.
3. After 10 minutes the cleansing process is done.
4. Rinse dentures under water and dry thoroughly.

Inhaltsstoffe/ingredients: Sodium Hydrogen Carbonate, Sodium Carbonate Hydrogen Peroxide, Sodizum Phosphate Tribasic, Potassium Peroxysulfate, Sulphamic Acid, PBS-1 (Mono), Povidone, Sulfuric Acid Monododecyl Ester Sodium Salt, N,N'-Ethylenebis (Diacetamide), Aroma, Color