

# reconval<sup>®</sup> k1

---

DE

**Art des Erzeugnisses:** medizinisches Erzeugnis

**Anwendung:**

Pflegecreme zur Erneuerung der aufgrund von äußeren oder chemischen Einflüssen in Mitleidenschaft gezogenen Haut. Diese Einflüsse schwächen die darauf empfindliche Haut und verschlechtern ihr Aussehen. Mit entsprechender Pflege wird die Haut erneut gekräftigt und ihr Selbstschutz wird verbessert. Die Creme wirkt wohltuend auf die entzündete Haut.

**Art der Anwendung und Dosierung:**

Die Creme wird angewendet bei:

- entzündeter Haut (nach pharmakologischer Behandlung)
- Aknehaut

Zur äußeren Anwendung auf unverletzter Haut.

Tragen Sie die Creme auf den gewünschten Hautbereich auf und massieren Sie sie gleichmäßig und zart ein. Sie kann täglich aufgetragen werden, bei Bedarf auch mehrmals pro Tag. Die Behandlung kann je nach Hautzustand mehrere Wochen bis zu mehrere Monate dauern.

**Hinweis:**

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die Creme nach abgelaufenem Haltbarkeitsdatum nicht mehr verwenden. Die Creme bei beschädigter Tube nicht mehr verwenden. Fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt. Informieren Sie Ihren Arzt, wenn nach zwei Wochen Behandlung keine sichtbaren Verbesserungen eintreten.



**Aufbewahrung:**

Bei Zimmertemperatur aufbewahren.

**Inhalt:** Tube, 50 ml

---



Pharmadab, d.o.o.

Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenia, EU

info@pharmadab.com, www.pharmadab.com



Medical Device

Datum der letzten Überarbeitung: 03/2020

# reconval<sup>®</sup> k1

---

**EN**

**Product type:** Medical Device

**Use:**

Protective cream for the restoring of the physiological conditions of the skin damaged by external and chemical factors which weaken sensitive skin and affect its appearance. Suitable skin care strengthens skin and improves its self-protection. This cream also has a beneficial effect on irritated skin.

**Dosage and method of administration:**

The cream should be used for:

- irritated skin (for example after drug treatment)
- skin with acne.

For external use on intact skin.

Apply the cream with clean fingers, gently and evenly rubbing it in over the desired area. The cream can be used daily or several times a day as necessary. The treatment may last from several weeks to several months, depending on the skin condition.

**Warning:**

Keep out of the reach and sight of children. Do not use the cream after its expiration date. Do not use the cream if its packaging is damaged. It is suggested to consult a doctor before use. Inform your doctor if no improvement is visible after two weeks of use.



**Storage:**

Store at room temperature, away from heat sources.

**Content:** tube, 50 ml / 50 fl oz

---



Pharmadab, d.o.o.

Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenia, EU

info@pharmadab.com, www.pharmadab.com



Medical Device

Date of the last revision: 03/2020