

ÜBER UNS - DIE FITTYDENT FAMILIE

„Wir garantieren Verbesserung Ihrer Lebensqualität“ Das ist nicht nur unsere Werbebotschaft, das ist das **Hauptziel unserer Arbeit**. Wir erlauben uns das zu behaupten, weil wir einerseits stets an der Verbesserung unserer Produkte arbeiten und weil wir auf **Millionen zufriedener Kunden weltweit** stolz sein können. Niemand von uns sucht es sich aus einen Zahnersatz zu tragen. Dies ist meist das Resultat von verschiedenen Umständen. Natürlich, es gibt Implantate, aber diese sind nicht für jeden Patienten geeignet. Manchmal ist der Kieferknochen nicht stark genug. Manchmal fehlt es an der erforderlichen Gesundheit um diesen Eingriff körperlich zu verkraften. Und manchmal – das ist der häufigste Grund – sind Implantate einfach nicht finanzierbar. Also trotz fortschreitender Technik und Wissenschaft bleibt manchen Patienten keine andere Wahl als Zahnprothesen zu verwenden. **Aber genau hier können und möchten wir helfen**. Sich an Ihre dritten Zähne zu gewöhnen braucht Zeit. Stellen Sie sich vor in wie vielen ganz alltäglichen Situationen Sie sich umstellen müssen. Wie vermeide ich Speisereste unter der Prothese? Wie trinke ich und was trinke ich? Und am unangenehmsten ist der Moment wenn Sie den Zahnersatz aus dem Mund geben, weil Sie ihn während der Nacht nach dem Reinigen in der Reinigungsdose lassen. Das ist der Teil Ihres neuen Lebens wo wir Ihnen zur Seite stehen möchten. **Die NaturDent Haftcreme ist wasserunlöslich. Sie spült sich nicht aus beim Essen und Trinken und hält den ganzen Tag.** Die **weltweit einzigartig patentierte Formel** ermöglicht Ihnen wieder selbstbewusst und sicher aufzutreten. Sie können Ihre Freizeit wieder genießen und am Sozialleben teilnehmen. Sie müssen sich keine Gedanken um Ihren Zahnersatz machen. Das ist Verbesserung der Lebensqualität. Das ist unser Slogan. Das ist was unsere Kunden bestätigen. Wir bezeichnen uns gerne als Fittydent-Familie. Dazu zählen unsere Kunden weltweit genauso wie unsere Vertriebspartner in **mehr als 68 Ländern**. Wir nehmen Ihre Meinungen, Empfehlungen, Kritiken und Erfolgsgeschichten sehr ernst. An dieser Stelle bleibt uns nur eines zu sagen: **„Willkommen in der Fittydent-Familie und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Lebensqualität verbessern.“**

FAQ

Enthält NaturDent Haftcreme Zink/ Gluten/ Laktose oder tierische Nebenprodukte? NaturDent Produkte sind vollkommen frei von Zink, Gluten, Laktose und Inhaltsstoffen tierischem Ursprungs.

Testet NaturDent an Tieren? Wir testen nicht an Tieren und werden es auch nie tun!

KONTAKT

Fittydent International GmbH
Carlberggasse 38/ Top 3/ 1.OG
A-1230 Wien

@ office@naturdent.eu

e www.naturdent.eu

f www.facebook.com/fittydentheadoffice



FFLYERND1118

NaturDent®

VEGAN
100%
gluten free



HAFTCREME

100% Lebensmittelinhaltsstoffe



... ganz natürlich





HAFTCREME

NaturDent – das erste Haftmittel weltweit, das aus Lebensmittel-Zutaten hergestellt wird und die **Kraft der Natur nützt**.

Die patentierte Formel der *NaturDent* Haftcreme garantiert extra starken und extra langen Halt für Oberkiefer-, Unterkiefer- und Teilprothesen. Das natürliche Koniferenharz wirkt als perfekter Stabilisator für die Zahnprothese – kein Verschieben, kein Verrutschen mehr und ein sicheres Gefühl den ganzen Tag! *NaturDent* ist das Produkt für jene Zahnprothesenträger, die bisher auf Haftmittel verzichtet haben um eine zusätzliche chemische Belastung für den Körper zu vermeiden.

- Gesund** - hergestellt aus Lebensmittelinhaltsstoffen
- Wasserunlöslich** - wäscht sich nicht aus beim Essen und Trinken
- Geeignet** - für Oberkiefer-, Unterkiefer-, und Teilprothesen
- Zinkfrei**
- Kein Verrutschen und Verschieben**
- Eine Anwendung pro Tag**
- Weniger Haftcreme - mehr Halt!**



ANWENDUNG



1. Zahnprothese reinigen und vollständig trocknen.
2. *NaturDent* Haftcreme in dünnen Streifen nicht zu nah am Rand auf die Prothese auftragen. Sparsam dosieren, sodass keine Haftcreme seitlich austritt.
3. Prothese einsetzen - Zähne kurz und kräftig zusammenbeißen. Möglichst 15 Minuten nicht essen oder trinken.
4. Tube nach Gebrauch sorgfältig verschließen.

Hinweis: Da jeder Kiefer unterschiedlich beschaffen ist, sollten Sie die für Sie notwendige Menge an Haftcreme selbst bestimmen. Dazu anfangs eine geringe Menge an NaturDent Haftcreme auftragen, in den nächsten Tagen solange steigern, bis der ideale Klebeffekt erzielt ist.

REINIGUNGSTABLETTEN

Wir **empfehlen** die Verwendung der *NaturDent* Reinigungstabletten um ein **perfektes Reinigungsergebnis** gewährleisten zu können. Aufgrund der pH9 Pflegeformel wird der Zahnersatz gründlich und schonend gereinigt. Die einzigartige Formel reinigt schnell und einfach, ist schonend zu Metall- & Acrylteilen und schützt vor Verfärbungen.



- Rasche Reinigung** der wasserunlöslichen Rückstände der *NaturDent* Haftcreme
- Schützt** vor Korrosion der Metallteile
- pH9 schont** das Material
- Zur täglichen Reinigung**

Die häufigsten Fehler beim Reinigen:

- Zahnpasta** mit Mikropartikeln verursacht langfristig kleine Risse im Material, welche Bakterien beherbergen können. Das kann zu Mundgeruch oder Verfärbung des Materials führen.
- Bleichmittel** können das Material angreifen und eventuell kann es zu Verfärbungen des Acryls führen.
- Einweichen:** Durch wiederholtes Liegenlassen in der Reinigungslösung über Nacht könnte Ihr Zahnersatz porös werden. Besser - nach dem Reinigen, Ihre Dritten trocken in der Reinigungsdose aufbewahren.



1. Prothese unter fließendem Wasser mit einer Bürste reinigen.
2. Eine Reinigungstablette mit der Prothese in der Reinigungsdose mit warmen - nicht kochend - Wasser bedecken.
3. Der Reinigungsprozess ist nach 10 Minuten abgeschlossen.
4. Prothese gründlich abspülen und trocknen.

Achtung: Vor Kindern geschützt aufbewahren. Tablette und Reinigungslösung nicht in den Mund nehmen.